

Usando o Sistema de Esterilização à Baixa Temperatura V-PRO® para descontaminar as máscaras respiratórias N95



O Food and Drug Administration dos USA concedeu à STERIS uma Autorização de Uso de Emergência temporária para descontaminar respiradores compatíveis ou equivalentes à N95 utilizando Esterilizadores V-PRO.

Essa solução permite que hospitais com Esterilizadores V-PRO apropriados, utilizem seus equipamentos existentes para reprocessar máscaras com segurança durante esta crise.

Todos os três Sistemas de Esterilização à Baixa Temperatura V-PRO® que possuem Ciclo Não Lúmen de 28 minutos (Modelos: 1 Plus, maX e maX 2) estão autorizados para uso nesta aplicação



Principais fatos:

- Esta solução local permite que até 10 máscaras por ciclo sejam descontaminadas em 28 minutos.
- A STERIS recomenda o reprocessamento de máscaras após cada uso, até no máximo 10 vezes.
- É altamente recomendável que os hospitais mantenham a cadeia de custódia da máscara para minimizar o risco de contaminação cruzada.
- As máscaras não precisam ser limpas antes de colocá-las na V-PRO. Se houver uma máscara N95 visivelmente danificada ou muito suja, a máscara deve ser descartada.
- A descontaminação seguindo estes procedimentos não afeta a função das máscaras nem altera os materiais de construção.
- Este é um processo temporário: descontaminar as máscaras N95 na V-PRO só é permitido durante a pandemia e somente se houver suprimento insuficiente de novos respiradores disponíveis para proteger os profissionais de saúde.

Para maiores informações, visite steris.com/covid-19

A MISSÃO DA STERIS É AJUDAR NOSSOS CLIENTES A CRIAR UM MUNDO MAIS SAUDÁVEL E MAIS SEGURO fornecendo soluções inovadoras de produtos e serviços de assistência à saúde e ciências da vida em todo o mundo.



Document #M10534EN.2020-04, Rev.A
© 2020 STERIS. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M Company and its affiliates